

Instrunet Inibsa Spray

Desinfección rápida de superficies
de productos sanitarios no invasivos.

Agradable perfume a limón.
Desinfección rápida de superficies
de material médico resistente al alcohol
(p.e. el sillón del dentista).



Bioseguridad
Protegemos tu clínica

Indicaciones y características

Rápido y eficaz. Amplio espectro de eficacia, sin aldehidos.

Modo de empleo

Antes de utilizar, verificar que la zona a tratar esté limpia y sea compatible con el alcohol.

- 1 Pulverizar en las zonas que desee desinfectar hasta que estén totalmente húmedas aplicando cantidad suficiente (+/- 40 ml / m²).
- 2 Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.
- 3 Solo es necesario enjuagar si la zona tratada ha de entrar en contacto con la piel o con las mucosas.

Composición

Etanol (Nº CAS 64-17-5): 550 mg / g, propionato de N,N-didecil-N-metil-poli(oxetil)amonio (Nº CAS 94667-33-1): 1,1 mg/g, perfume.

Precauciones de uso

PELIGRO. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar gafas y máscara de protección. Eliminar el producto y su recipiente tomando todas las precauciones de uso. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al **Servicio Médico de Información Toxicológica**, tel.: **91 562 04 20**. Producto Sanitario. Uso reservado a los profesionales. Fabricado en Francia.

Propiedades microbiológicas

Eficacia	Normas	Tiempo contacto
Bactericida*	EN 13697*, EN 13727*	30 segundos
Micobactericida*	EN 14348*	5 minutos
Levuricida*	EN 13697*, EN 13624*	30 segundos
Tuberculicida*	EN 14348*	30 segundos
Activo en virus encapsulados*	EN 14476*, EN 16777*	30 segundos
Virucida de espectro limitado	EN 14476*, EN 16777*	5 minutos (Adenovirus en 30 segundos Norovirus (MNV) en 5 minutos)

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición.

*=condiciones de limpieza.

Distribuido por:

Inibsa Dental, S.L.U. Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (España). T +34 938 609 500 | F +34 938 439 695

Laboratories Anios. 1, rue de L'Espoir - 59260 Lezennes. T +33 320 676 767 | F +33 320 676 768

Contacta con nosotros: 900 052 240 | www.inibsa.es | dental@inibsa.com

Síguenos en:  